

A rendelői fogfehérítő kezelések korlátai

A nagy koncentrációjú hidrogén-peroxidok egy óránál hosszabb ideig tartó alkalmazása nemcsak kényelmetlen lehet a páciensek számára, hanem gyakran a **zománc dehidratációját** is eredményezi. Így a fogfehérítő kezelés eredménye "módosul", a fogfelszín intenzív, de átlátszatlanul fehér lesz. Ez a "fehér hatás" szükségszerűen **rövid távú visszafejlődést okoz**, és bizonyos esetekben (dohányzó vagy tea/kávé fogyasztására szokott pácienseknél) az árnyalat akár még a **kezelés előtti, fehér diéta nélküli árnyalatnál is rosszabbá válhat**.

A magas koncentrációjú hidrogén-peroxid alkalmazása hosszú kontaktidővel (40-60 perc) kombinálva **"folyékony fázist"** hoz létre, amely lehetővé teszi, hogy a peroxid **könnyen bejusson a zománc mikrorepéseibe, valamint az ínymaszk alá**.

Ez növeli a **káros hatások kockázatát**.

Egy nemrégiben végzett felmérés¹ szerint a résztvevő páciensek a professzionális fogfehérítés után az alábbi kellemetlenségekről számoltak be a leggyakrabban:

- **29% Hosszan tartó (1 napnál hosszabb ideig tartó) fogérzékenység.**
- **25% Átmeneti fogérzékenység (max. 24 óra)**
- **12% Az íny irritációja/fehéredése.**
- **5% Az ajkak vagy a bőr égése**

Fontos emelni, hogy a **rendkívül agresszív orvosi fogfehérítő kezeléseket nem javasolt túlzottan alkalmazni** a páciensek elvárásainak való megfelelés kedvéért. A 40%-os hidrogén-peroxid mindössze 60 perc alatt károsítja a zománcot...

Mi történik akkor, ha rövid időn belül többször megismételjük a kezelést?

Az ilyen **káros hatások ellensúlyozása érdekében** a peroxidos fogfehérítők **deszenzibilizáló vagy remineralizáló** szereket tartalmaznak, vagy magában a fehérítő anyagban vagy a kezelés utáni kiegészítésként.

Egyesek szakemberek **fájdalomcsillapítók** használatát is javasolják a kezelés előtt és után.



PLUS ULTRA

A non plus ultra ellentétje, jelentése: "Túllépni", legyőzni a korlátainkat.

1492-ben a genovai Cristoforo Colombo kihajózott a tengeren túlra. Elhatározta, hogy legyőzi határait... Felfedezett egy Új Világot.

ULTRA⁺ A rendelői fogfehérítés határain is túl

Kezelések	
	REF 012001 BlancOne® ULTRA⁺ Single Kit 3 x BlancOne ULTRA+ Cycle Pack: 1 x Fogfehérítő gél 0,75ml 1 x Photo Booster 0,25ml 1 x BlancOne® Gingiva Maszk 1,20ml
	REF 012003 BlancOne® ULTRA⁺ Multi Kit 9 x BlancOne ULTRA+ Cycle Pack: 1 x Fogfehérítő gél 0,75ml 1 x Photo Booster 0,25ml
Kiegészítők	
	REF 019002 1 x BlancOne® Gingiva Maszk 1,20ml
	REF 030105 REF 030106 REF 030107 1 x BlancOne® Szájterpesz - SMALL 1 x BlancOne® Szájterpesz - MEDIUM 1 x BlancOne® Szájterpesz - LARGE
	REF 030108 30 x BlancOne® Face Protection

BlancOne® ULTRA⁺ egy CE orvosi eszköz a fogak elszíneződésének kezelésére, kizárólag fogorvosok és dentálhigiénikusok professzionális, rendelésen belüli használatára.

BLANCONE®

www.blancone.eu/pro
helpdesk@blancone.eu

 [blancone](#)  [blancone_ids](#)  [blancone](#)
 [blancone team pro](#)(professional group)

IDS

IDS Spa - Via San Cristoforo, 28/10 - 17100 Savona - Italia
Tel. 019 862080 - Fax 019 2304865 - email: info@idsdental.it
www.idsdental.it

A BlancOne az IDS Spa védjegye.

Rev 1 - 24/5/22



ULTRA⁺

Plus Ultra
A rendelői fogfehérítés határain is túl

BLANCONE®

The whitening treatment for you

NON PLUS ULTRA?

A non plus ultra egy latin kifejezés jelentése: "nincs tovább"

Történelmileg a Herkules-oszlopokra utal, ami az "ismert világ" végét jelentette.

A rendelőben végzett nagy koncentrációjú peroxidokkal végzett fogfehérítés az egyetlen olyan lehetőség, amellyel egyetlen kezelés alatt elérhető a legjobb eredmény.

Az otthoni kezelésekkal ellentétben - amelyek csak fokozatosan nyújtanak látható eredményt, ami így kevésbé észrevehető a páciensek számára - a rendelői fogfehérítés még a **legsúlyosabb elszíneződéseket is képes kezelni, és azonnal látható eredményt ad**, ráadásul anélkül, hogy hosszú hetekig síneket kelljen hordani.

Az, hogy a szakember a rendelőben azonnali és jelentős előtte-utáni különbséget tud nyújtani ahelyett, hogy a páciens az eredményt otthon érné el, az a **"non plus ultra" a professzionális fogfehérítő kezelések között**, amellyel képesek leszünk kielégíteni azokat a pácienseket, akik erősen motiváltak, és a mosolyuk megjelenése miatt **jelentős elvárásokkal és komolyabb vásárlóerővel rendelkeznek**. Ezek a páciensek a **legjobb és legtartósabb fehérítési eredményeket** akarják ... és azt természetesen most.



A legjobb eredmény kell, amely hosszan tart és most azonnal! OK, de milyen áron?




A legjobbat a pácienseinek



2000
Piergallini és Loupis fogorvosok és a kutatók megkezdtek kutatásukat a fotokémia területén



2010
BlancOne® 1.0 technológia Fogfehérítő kezelések fénysebességgel - először a piacon

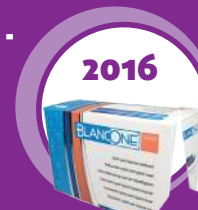

2016
BlancOne® 2.0 technológia Az első, dentalhigiénia utáni 10 perces fehérítő kezelés meghódítja a piacot




2022
BlancOne® 3.0 technológia A fotokémia hatékonysága kitolja a fogfehérítés határait

A legjobbat Önnek

Eddig soha nem tapasztalt fehérítő hatékonyság

A Genovai Egyetem Gépészmérnöki Karának DICCA tanszékén végzett in vitro vizsgálatok kimutatták a BlancOne® Ultra+ rendkívüli hatékonyságát a fogszerkezet fényességének javulásában, összehasonlítva a piacon jelenleg kapható legjobb rendelői kezelésekkel.

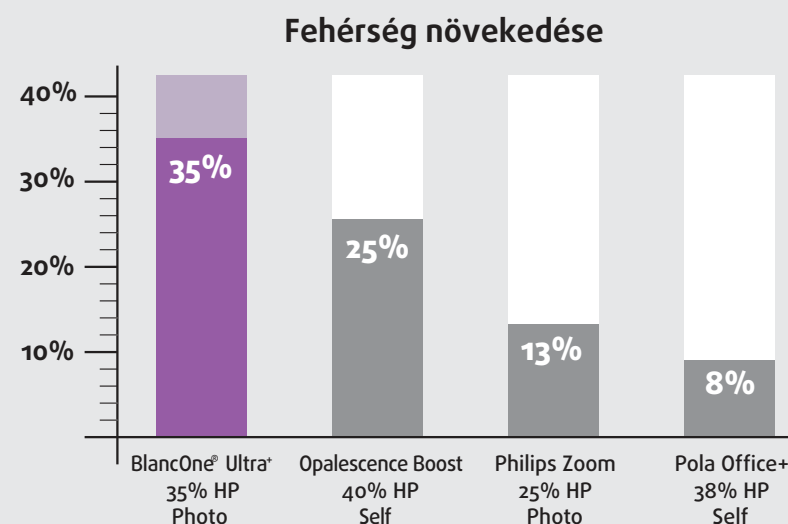

A kontakt idő kevesebb, mint felére csökkent

Az eredményeket a BlancOne® Ultra+ alap protokolljával, azaz 3, egyenként 8 perces ciklussal értük el, szemben a versenytársak által ajánlott maximális protokollokkal, így képesek vagyunk kombinálni a legjobb hatékonyságot a betegek kényelmével, ráadásul redukált rendelői idő alatt.




BlancOne® Ultra+
(3x8=24 minutes)



Opalescence Boost
(3x20=60 minutes)



Philips Zoom
(4x15=60 minutes)

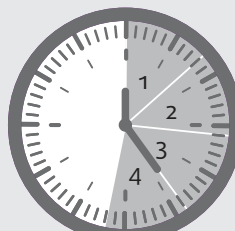

Pola Office+
(4x8=32 minutes)



Chiara Lorenzi
★★★★★

"Nagyon elégedett vagyok az új Ultra+-nak köszönhetően elért eredményekkel. Nagyon értékelem a krémes állagot, amely megkönnyíti a keverést, és emiatt könnyen felvihető. A gél könnyen eltávolítható és leöblíthető. Kiváló fehérítő hatékonyság, ami kiválóan bizonyult"



Valentino Natoli
★★★★★


"A terméket rendkívül könnyű használni, és nincs kellemetlen posztoperatív érzékenység. Az eredmények kitűnőek, a páciensek pedig szuper boldogok."



Romina Rossoli
★★★★★

"A végső szín és az eredmény stabilitása kiváló, a pácienseim nagyon elégedettek. Az egyadagos fecskendőket tartalmazó csomag praktikus és rugalmasan kezelhető, amikor például csak a szemfogak esetében van szükség a fogfehérítő kezelésre."

Az eredmény stabilitása az idő múlásával

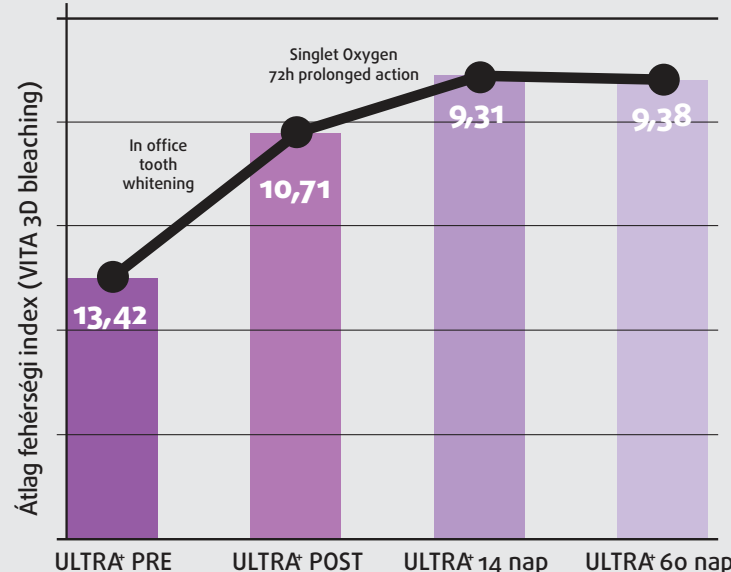


Semmi fogérzékenység

Az új BlancOne® Ultra+ fehérítő gél mátrixa nem tartalmazza a "folyékony fázist", ezzel minimálisan csökkentve a peroxid bejutásának lehetőségét a zománc mikropedéseiibe, valamint az íny védelme alá.

Ezzel a fogak érzékenységének kialakulása és a fájdalmas ínszöveti égési sérülések veszélye gyakorlatilag megszűnik.

Az Ultra+ nem tartalmaz deszenzibilizáló anyagokat.

Hiperszenzitivitás gyakorisága

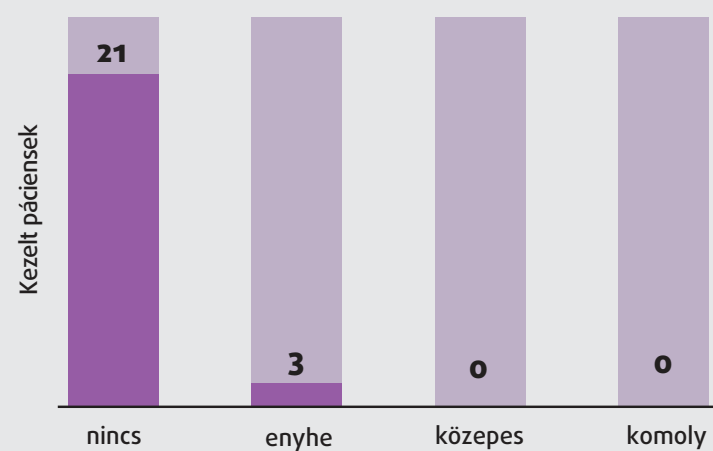


Tiszteletben tartva a zománcot

A Genovai Egyetem Gépészmérnöki Karának DICCA tanszékén végzett in vitro vizsgálatok azt mutatták, hogy minél hosszabb a magas peroxid tartalmú fogászati anyagokkal való érintkezési idő, annál nagyobb a zománcszerkezet roncsolódásának a kockázata.



Nem kezelt zománc

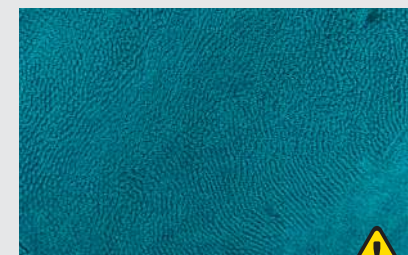

Felmaródott zománcfelszín
40%-os hidrogén-peroxiddal kezelve
60 perces kezelés (több ciklus) után

Ezzel szemben a BlancOne® Ultra+, alacsonyabb koncentrációjának és rövidebb érintkezési idejének köszönhetően, csak enyhe és átmeneti elváltozást okoz, tiszteletben tartva a zománc felületét, ezért nincs szükség remineralizáló szerekre.



Stefano Checchi
Silvia Fasoglio
★★★★★

"A termék új verziója további kezelési lehetőségeket teremt, hogy minden egyes fogfehérítő kezelést egyedi élménnyé tegyen!"



Giuseppe Lipani
★★★★★

"A fehérítő termék rendkívül hatékonynak bizonyult, nagyon könnyű összekeverni, alkalmazni és eltávolítani. Sem a kezelés alatt, sem utána nem volt semmilyen érzékenységi problémám. A fogak ragyogóak és nem dehidratálódtak. A kiváló egyadagos kiszerelés sokoldalúvá teszi a felhasználást, és lehetőséget nyújt akár egyetlen fog fogív fehérítésére is a termék pazarlása nélkül."



Giulia Zanonato
★★★★★

"Öszintén hiszek a mosoly erejében, annyi esetben voltam már tanúja annak, hogy a betegnek élete javult a BlancOne termékek használata után, és ez most még jelentősebb az új Ultrának köszönhetően"

Gél-gél keverék

A BlancOne® Ultra+ gél előkészítése két fecskendő (fotoaktivátor + fehérítő gél) egyszerű és gyors összekapcsolásával és összekeverésével történik.

Krémes textúra

A krémes állag lehetővé teszi a gél problémamentes felvitelét a fogfelszínre, szilárdan, ragadás és elfolyás nélkül, és később könnyen el is távolítható.

Egy adagos kiszerelés

A BlancOne® Ultra+ egy adagos kiszerelésben kerül forgalomba, ezzel garantálva az éppen bekevert gél maximális teljesítményét, valamint a megfelelő rugalmasságot a különböző klinikai igényeknek megfelelő protokoll kiválasztásában.

Nincs szükség hűtőre

Az új fehérítő gélmátrixnak köszönhetően a BlancOne® Ultra+ szobahőmérsékletű környezetben is tárolható a gyártástól számított 24 hónapig.

Két termék egyben

A BlancOne® Ultra+ nemcsak a fogfelszínen használható, hanem a pulpakamrában is, így lehetővé teszi mind a vitális, mind a nem vitális fogak kezelését a rendelőben.



Aldo Mazzella
★★★★★

"Az új Ultra+ egy nagy teljesítményű fogfehérítő, amely még a nem vitális, erősen elszíneződött fogak esetében is működik. Több esetben is használtam csodálatos eredménnyel, nagyon ajánlott."



Claudio Pasquale
★★★★★

"A BlancOne Ultra+ minden szakmai igényt kielégít, teljes mértékben kihasználva a fotokémiai aktiválás által adott teljes potenciált, kiváló és tartós eredményt biztosítva ezzel a pácienseink számára."

